

本書は、アシストホイールライトの基本的な操作についてまとめたものです。
必ず取扱説明書(別冊)を合わせてお読みいただき、安全にご使用ください。


バッテリーの充電方法

充電方法は消費分を回復する充電と、放電後充電するリフレッシュ充電の2種類です。
バッテリーの性能を回復するため、月に1度リフレッシュ充電をしてください。(別冊「取扱説明書」参照)

- 1 ACコードのプラグを、100Vコンセントに差し込みます。



- 2 バッテリーの充電端子に、充電器のコネクタを接続します。

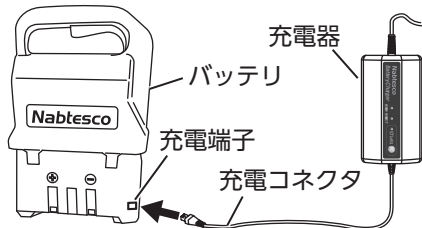

※充電器のコネクタは向きを確認してから充電端子に接続してください。

充電は約120分で完了します。


充電中

赤




充電完了

緑

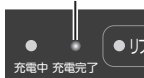


※充電時間は、バッテリーの使用状況や環境により異なります。

- 3 充電完了後、充電器のコネクタをバッテリーから取り外します。

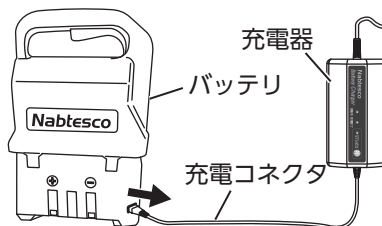

- 4 ACコードのプラグを、100Vコンセントから抜きます。

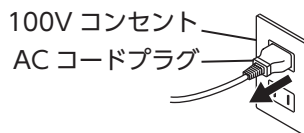


アシスト機能の使用準備

- 1 駐車ブレーキをかけ、タイヤをロックします。

〔駐車ブレーキのロック方法〕

左右両側にある駐車ブレーキのレバーを、それぞれ後ろに引きます。

タイヤがロックされます。

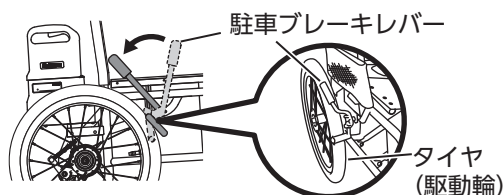


- 2 充電済のバッテリーを準備します。

- 3 バッテリーの取っ手をしっかり握り、バッテリーのロックを解除します。



※ バッテリーのロック解除レバーは、バッテリーの取っ手部分に設置されています。

- 4 バッテリーを方向指示シールの向きに合わせ、バッテリー収納部にしっかりと差し込みます。

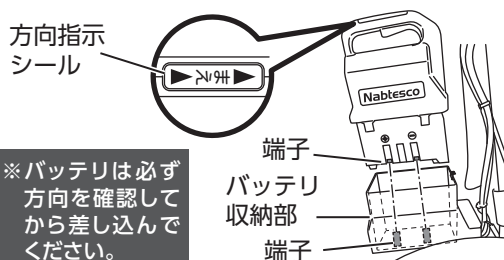


※ バッテリーは必ず方向を確認してから差し込んでください。

- 5 電源を入れます。

電源スイッチを残量表示ランプが点灯するまで長押ししてください。



- 6 ランプ点滅後、残量表示ランプにバッテリーの残量が表示されます。バッテリーの残量が十分にあることを確認してください。 (「バッテリーの残量表示」参照)

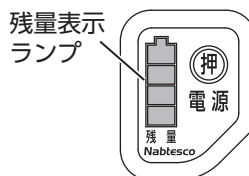


※ 残量表示ランプが1つしか点灯していない場合は、バッテリーを充電してください。

車いすの操作方法

車いすの運転は、必ず駐車ブレーキのロックを解除してから行ってください。

〔駐車ブレーキの解除方法〕


左右両側にある駐車ブレーキのレバーを、それぞれ前へ押します。タイヤのロックが解除されます。

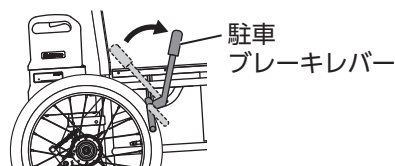

以下の説明は、アシスト機能の使用を前提にしています。


〔前進する（平地を進む・坂を上る）〕

左右のハンドル部を軽く押し、前方に歩きます。

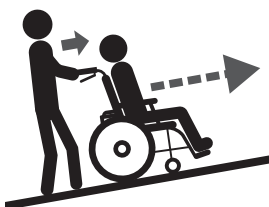

〔後進する〕


左右のハンドル部を軽く引き、後方を確認しながら後ろ向きに歩きます。

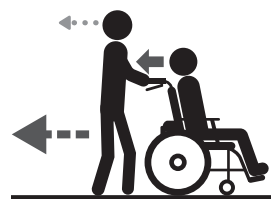

〔坂を下る〕 ※急な坂道は安全のため後向きに下りてください。


・前向きに下る

左右のハンドル部を軽く引くようにして、前方に歩きます。

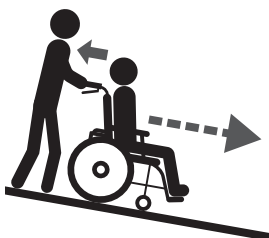

・後向きに下る


左右のハンドル部を軽く押すようにして、後方を確認しながら後ろ向きに歩きます。

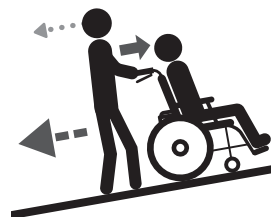

〔キャストを浮かせる（段差や溝の乗越え）〕

※段差の乗越え中は、電源を必ず切ったままにしてください。

1 電源を切ります。

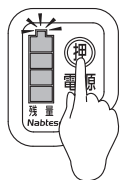


2 ティッピングレバーを足で前に押す、または後ろに動かさないよう支えます。



3 左右のハンドル部を後ろに引き、キャストを段に上げます。

4 タイヤが段差の端に当たるまで進めます。

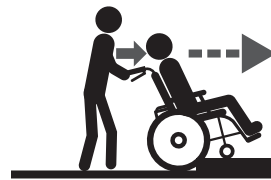

5 左右のハンドル部を押し上げて、段差を乗り越えます。



6 段差を完全に乗り越えたら停車をし、電源を入れます。

〔停止する〕 ※緊急時以外はハンドブレーキで停止しないでください。

・通常停止（前進）

左右のハンドル部を軽く引きます。

・通常停止（後進）

左右のハンドル部を軽く押します。



・緊急停止または急な坂道での停止
急に停止する場合や急な坂道の途中で停止する場合は、ハンドブレーキをかけます。




バッテリーの残量表示

表 示		バッテリーの状態	内 容
	4 個点灯	約 75 ～ 100%	使用できます
	3 個点灯	約 50 ～ 75%	
	2 個点灯	約 25 ～ 50%	
	1 個ゆっくり点滅 (0.5 秒点灯 / 0.5 秒消灯)	約 0 ～ 25%	できるだけ早く充電してください
	1 個速い点滅 (0.1 秒点灯 / 0.1 秒消灯)	0%	すぐに充電してください
	点灯なし	バッテリー未接続	・ バッテリーを差し込んで、電源を入れてください ・ 点灯しない場合は、お買い上げの販売店に連絡してください

安全にお使いいただくために

※安全上の警告・注意についての詳細は取扱説明書（別冊）に記載しています。ご使用前に必ずお読みください。

車いすは、10°（約 1/6）を超える坂道で使用しない
転倒などの事故につながるおそれがあります。

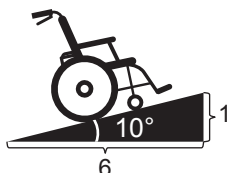

滑りやすい路面や濡れた路面では使用しない
車いすがスリップして事故につながるおそれがあります。



車いすから離れるときは、必ず電源を切り、駐車ブレーキをかける
車いすが勝手に動き出し、事故につながるおそれがあります。



車いすを傾斜地に駐車や停車しない
転倒などの事故につながるおそれがあります。



坂道の途中で電源を切らない
アシスト機能が失われると、車いすを支えきれず、事故につながるおそれがあります。



ハンドル部やハンドルの蛇腹部に荷物をかけたり、ハンドルの蛇腹部に触れたりしない
アシスト機能が意図せず起動し、操作が制御できなくなるおそれがあります。



お問い合わせ先

TEL: 078-413-2724

営業時間：9:00 ～ 17:00（土日祝休み）

FAX: 078-413-2725

ナブテスコ株式会社

住環境カンパニー 福祉事業推進部

〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 35

<http://welfare.nabtesco.com>