

販売店様用 ※使用者の方には渡さないでください

CONPALユニット(抑速ブレーキユニット)

抑速ブレーキ力調整要領書

抑速ブレーキ力調整方法について記載しております。また、取扱説明書もあわせてご確認ください。

警告

- ・ 調整窓に指を入れないでください。指をはさんで、ケガをする恐れがあります。
- ・ 調整後は、必ずセンターキャップを取り付けてください。埃や水が侵入して動作不良の原因になります。
- ・ 調整は販売店様や療法士の方や施設職員の方が、必ず使用者のレベルに合わせて調整してください。

注意

- ・ センターキャップを外す時は、コインやマイナスドライバーをご使用ください。爪で外そうとすると怪我をする恐れがあります。
- ・ 調整は3段階です。それを超えて回すと、調整部が破損しますので注意してください。
- ・ 六角レンチを挿したまま、タイヤを回さないでください。調整部が破損する恐れがあります。
- ・ 調整の段階は左右同一にしてください。左右のブレーキ力の不一致により、予期せぬ転倒につながる恐れがあります。

- ① 歩行車に CONPAL ユニットを取り付けた状態のまま CONPAL ユニットの センターキャップ を取り外します。(図 1)
- ② タイヤを回転させ、車輪(外側)の 調整窓 と 調整部 の位置を合わせます。(図 2)
- ③ 調整部の六角穴に付属の六角レンチを差込みます。
- ④ 六角レンチを回し、調整部の矢印を調整したい強さの位置に合わせることでブレーキ力の調整を行います(図 2)。ブレーキ力 弱、中、強のそれぞれの調整位置は図 3~図 5 を参照してください。
- ⑤ 調整が完了したら、六角レンチを取り外し、センターキャップ をしっかりと取付けます。
- ⑥ 左右の車輪ともに同じ強さのブレーキが作動することを確認します。

図 1

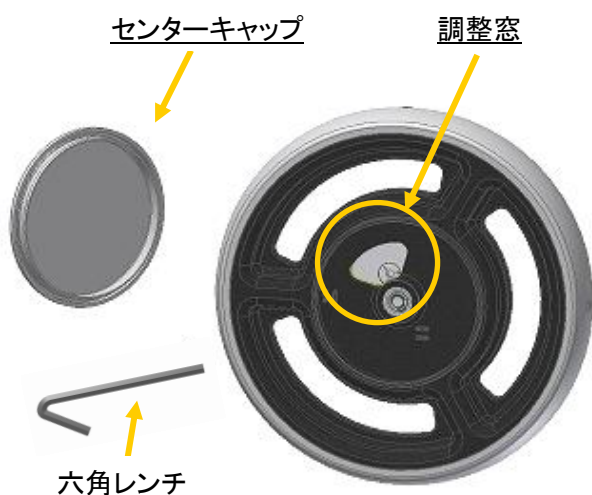


図 2



⚠ 注意

調整範囲を超え、過度のトルクで六角レンチを回した場合、調整機構が破損する可能性があります。
 そのため付属のレンチは長い方だけ差し込めるように、意図的に深く曲げております。
 お手持ちのレンチをお使いの場合は、レンチの長いほうを差し込み、調整範囲を超えて回し過ぎないように
 ご注意ください。

図 3



ブレーキ力 弱

図 4



ブレーキ力 中

図 5



ブレーキ力 強

図 6

ホイールのシールドデザインは図 2～5 に示すものと下図のような 2 通りあります。
 調整の方法やブレーキ力は同じです。



発売元および製造元

ナブテスコ株式会社

住環境カンパニー 福祉事業推進部

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 35

TEL: (078)-413-2724 FAX: (078)-413-2725

ホームページ: <http://welfare.nabtesco.com>